

UniVox P-Loop teleslyngekoffert

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

GEWA

- helping people



Generelt

UniVox P-Loop teleslyngekoffert er et bærbart teleslyngesystem med innebygd teleslyngesforsterker, 50 m kabel og tilhørende Listener kontroll- og lytteinstrument. Som tilleggsutstyr kan kofferten også utstyres med innebygd trådløst mikrofonsystem og trådløse oppladbare høyttalere fra Okayo.

Bruk


Teleslyngekofferten er senderen i et system hvor telespolen (T/MT/mT) i høreapparatet er mottakeren. Brukerne av systemet bør sitte innenfor teleslyngesystemet for å få best mulig lyd kvalitet.

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Tilkobling

Legg ut teleslyngekabelen rundt det området det ønskes dekning. Start med trommelen og hvis det ikke er nok, skjõt på med forlengelseskabelen. Kople strømledningen til uttaket merket "230-240V AC". Strømledningen skal trekkes ut gjennom hullet på siden av kofferten slik at den ikke blir liggende i klem."ON" skal nå lyse. Bruk medfølgende mikrofoner eller kople til mikrofoner eller lydanlegg i kontakter merket "IN" og still bryter i riktig posisjon (MIC for mikrofon og LINE for linje fra lydanledd). Juster følsomheten for hver inngang for seg ved kun å ha 1 mikrofon/kilde tilkopleet av gangen slik at "IN" lyser når det snakkes normalt i mikrofonen. Avslutt med å holde Listener i lyttehøyde mens slyngestrømmen "loop current" justeres inntil lyset på Listener lyser blått når det snakkes normalt i mikrofonen. Trådløse mikrofoner skal bare skrues av og på, eventuelt "mute". NB! Det skal ikke være nødvendig å endre kanaler.

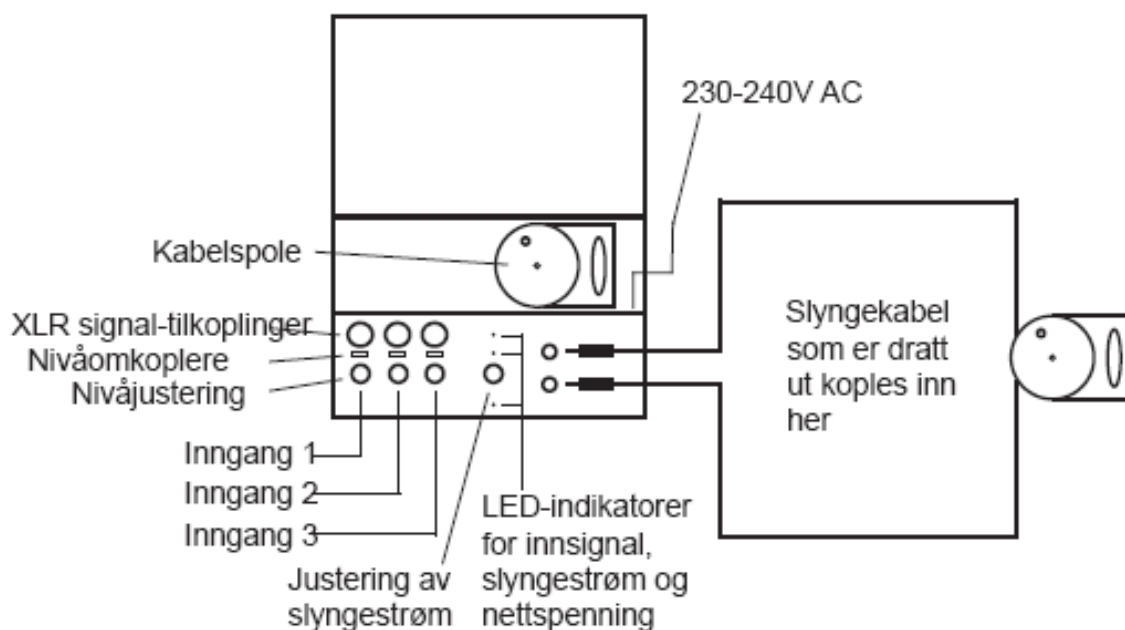

Viderekopling

Telekoffertens lyd kan koples videre til annet lydutstyr via utgangen merket "0dB Out". Benytt kabel med phono-kontakt/RCA (ikke inkludert).

Gode råd

- Bare 1 bør snakke av gangen
- Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt – aldri med ryggen mot et lyst vindu
- Se på dem du snakker til
- Snakk klart og tydelig inn i mikrofonen – aldri med hendene for ansiktet/munnen
- Ikke rop, men bruk naturlig stemme og ikke overdriv munnbevegelsene
- Blir du ikke forstått, prøv en gang til, gjerne med andre ord
- Gjenta eventuelle spørsmål fra salen